

Indexel®

Steriler Transponder zur elektronischen Kennzeichnung von Hunden, Katzen, anderen Kleintieren und Ziervögeln (nicht für Equiden in Deutschland)
Dieses Produkt entspricht den ISO-Normen 11784 /11785. FDXB-Technologie.



Inhalt einer Packung

Jede einzelne Packung enthält einen Transponder, gebrauchsfertig und steril in einem Einmal-Implantiergerät verpackt, mit individueller Identifikationsnummer und entsprechenden 8 Barcode-Etiketten (eines außen).

Bestimmungszweck

Zur elektronischen Kennzeichnung von Hunden, Katzen, anderen Kleintieren und Ziervögeln (nicht für Equiden in Deutschland).

Anwendung

- Durch die sterile Verpackung hindurch die korrekte Funktion der vorprogrammierten Identifikationsnummer des Transponders mit einem geeigneten Lesegerät kontrollieren.
- Desgleichen den für die Implantation vorgesehenen Bereich kontrollieren, ob das Tier nicht bereits gekennzeichnet ist.
- Unversehrtheit der sterilen Verpackung prüfen.
- Desinfektion der Implantierstelle

Implantierstellen

- Hund und Katze: subkutan an der linken Halsseite, halbe Strecke zwischen Ohr und Schultergelenk, in Höhe des zweiten Halswirbels.
- Ziervogel: intramuskulär in den linken Brustmuskel, parallel zum Brustbein.

Der Indexel® Transponder wird in 4 Schritten implantiert:

1. Den roten Sicherheitsring am Stempel entfernen.
2. An der Einstichstelle eine Hautfalte bilden; zur subkutanen Implantation bei Kleintieren die Kanüle unter der Haut weit vorschieben. Zur intramuskulären Implantation bei Ziervögeln das Indexel® Implantiergerät wie eine klassische Spritze handhaben.

3. Das ergonomische Implantiergerät mit zwei Fingern an den Griffmulden halten, mit dem Daumen den Stempel fest vordrücken, um den Transponder abzusetzen.
4. Dann die Kanüle zurückziehen, dabei die Haut des Tieres weiter festhalten.

Falls erforderlich, kann eine Blutstillung an der Implantierstelle durch Kompression erreicht werden.

Eine Probeablesung machen.

Die selbstklebenden Etiketten zur Dokumentation (z.B. im Impfpass) und Registrierung in einer Datenbank benutzen.

Zu beachten

Implantation unter aseptischen Bedingungen durchführen.

Implantiergerät ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt und danach unschädlich zu beseitigen. Die Nadel kann vom Spritzenkörper abgedreht und in einem dafür vorgesehenen Behältnis entsorgt werden.

Zur optimalen Ablesung ist ausreichend Abstand zu elektromagnetischen Störquellen wie Bildschirmen und anderen Elektrogeräten in Betrieb, Mobiltelefonen (auch im Ruhezustand) sowie zu metallischen Gegenständen zu halten.

Aufbewahrung

Bei Raumtemperatur bis zum aufgedruckten Verfalldatum. Das Verfalldatum bezieht sich nur auf die Sterilität des Packungsinhaltes, nicht auf die Funktion des Transponders.

Nur zum tierärztlichen Gebrauch.

Implantierstellen gemäß Empfehlungen internationaler Organisationen (FECAVA, WSAVA, ISO).

Handelsform

Packung mit 10 einzeln verpackten Transpondern

Hersteller: **ALLFLEX EUROPE**

Route Des Eaux – B.P. 90219

F-35502 VITRE CEDEX

Frankreich

Vertrieb: **Merial GmbH**

Am Söldnermoos 6

D-85399 Hallbergmoos